

新型コロナウイルス 抗原検出キット **2回分**

LionRun™ SARS-Cov-2 Antigen Rapid Test [Colloidal Gold]

ご自宅で
簡単・手軽

最短10分で
検査可能

1箱で2回
検査OK

4,400円 (税込)

事前検査で、安心な旅を楽しもう！

「新型コロナウイルス」の抗原検査をご自宅で簡単セルフチェック！
ご旅行・帰省・出張などにお気軽にご利用ください。

※本製品は新型コロナウイルス感染を確定診断するものではありません。



特長 ラテラルフローイムノアッセイ法(イムノクロマト法)
最短10～15分程度での判定結果が出るので、
PCR検査に比べて短時間で結果が判明します。

内容 1箱に2回分の検査キットが入っています。

付属品 ・日本語説明書×1 ・検体採取用綿棒/スワブ×2
・判定用テストプレート×2 ・検体処理ボトル×2
・試液×2

製造元 Shanghai Liangrun Biomedicine Technology Co.,Ltd.

認証 EUによるCEマーク認証済製品

使用方法

① サンプル採取

鼻咽頭スワブ採取・口咽頭
スワブ採取・唾液採取から
サンプル採取方法を選べます。

② サンプルの処理

スワブを試液ボトル内に
浸しながら3～5回かき回し、
1分程放置します。
※唾液はそのままボトルにいれます。

③ 処理液を滴下し 判定結果

検査スティックにサンプル
処理液を3～4滴滴下し、
判定結果を待ちます。



お申込みにつきましては
各支店もしくは、いい旅予約センターにて承ります
いい旅予約センター TEL : 0570-048908

新型コロナウイルス 抗原検出キット

ご利用に際してのご注意

- 本製品は、研究用 簡易検査キットです。
- 本製品の使用により発生した損害および損失について、弊社では責任を負いません。
- 容器に破損、液漏れ等見られる場合は使用しないでください。
- 詳しくは同封の説明書にて確認してください。
- 検査カード袋の裏側に記載された製造日と使用期限をご確認頂き、使用期限内にご使用ください。

“陽性”判定が 出た場合

保健所、または医療機関にご相談ください。
新型コロナウイルスに感染している可能性が考えられます。
保健所またはかかりつけの医療機関にご相談の上、
PCR検査、確定診断をお勧めいたします。

“陰性”判定が 出た場合

新型コロナウイルスに感染していない可能性はありますが、
感染していないことを保証するものではありません。
新型コロナウイルスの症状と思われる症状などがある場合は、
保健所、または医療機関にご相談ください。

- ※本製品は研究用製品です。医療機器、および体外診断用医薬品ではありません。
- ※本製品は研究用、調査用のものです。診断や治療には使えません。
- ※検査結果を診断に使用しないでください。